


## TECHNISCHES DATENBLATT

### 20100

Material:	Polypropylen / Papier, blau
Sonstiges:	Rollenbreite 100 mm
Verpackungseinheit:	4 Stück

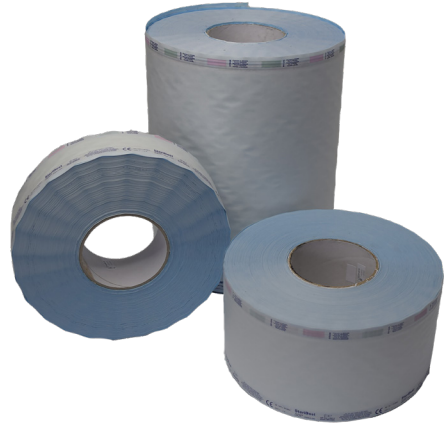

### Beschreibung

Sterilisationsfolie mit Dampf- und EO-Gasindikator, Polypropylen / Papier, blau, für FO-Sterilisation geeignet, Rollenlänge 200 m, Rollenbreite 100 mm, Verpackungseinheit 4 Stück

### Hinweise zur Siegelung

Siegeltemperatur: 160° C / 180° C

Zeit zwischen den Riegeln der Maschine und dem Produkt: 0,9 Sekunden / 1,5 Sekunden

Druck: 1 -3 bar

Empfohlene Temperatur: 160° C und 180° C

### Sterilisationsverfahren

Dampfsterilisation: 121° C = 15 Minuten (Minimum) / 134° C = 5 Minuten (Minimum)

EtO Gas: 50 - 60° C = 3-6 Stunden

### Hersteller

VERISTERIL | STERIFIT S.R.L. | Via dei Martinitt 3 | 20146 Milano (MI) | Italy