

TECHNISCHES DATENBLATT

58048 // PROTECTASEPT DUO WIPES

Typ: Desinfektionstücher, gebrauchsfertig, neutral

Grösse: 14 x 21 cm

Verpackungseinheit: 1.248 Stück (26 Flowpacks à 48 Tücher)





Beschreibung

Gebrauchsfertige Hygienetücher zur Händedesinfektion und zur Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen, aus 100% biologisch-abbaubaren Zellulose-Fasern mit optimaler Wirkstoffabgabe und breitem Wirkungsspektrum, mit Desinfektionmittel getränkt und sehr gut hautverträglich, sehr praktische und einfache Entnahme und Anwendung des Flowpack mit wiederverschließbarem Deckel, "ein-Hand-Entnahme" durch einzelne Tücher möglich, Tuchgröße von 14 x 21 cm, Flowpack mit 48 Tüchern mit neutralem Geruch, Wirksamkeit nach EN 1500, EN 13727/13624, EN 14476, Zulassung als Biozid, Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland, Biozidprodukte vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen, Behältnisse gut verschlossen halten, Haltbarkeit: 2 Jahre, Standzeit: 28 Tage, Biozid-Nr.: N-96396

Präparate-Typ

Gebrauchsfertige, vorgetränkte Hygienetücher zur Desinfektion der Hände und Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen.

Anwendung

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände wie auch Flächen reinigen. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamtem Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten; gegebenenfalls ein weiteres Tuch nutzen.

Zusammensetzung

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 0,8g Didecyldimethylammoniumchlorid; 0,5g 2-Phenoxyethanol

Einwirkzeiten

Wirksamkeiten der Tränklösung:

Hygienische Händedesinfektion EN 1500: 60 Sek.

Flächendesinfektion: Bakterizid/levurozid EN 13727/13624 (hohe Belastung): 30 Sek. Flächendesinfektion: Begrenzt viruzid nach EN 14476 (geringe Belastung): 60 Sek.

Vertrieb

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland.