

58090 // PROTECTASEPT

Desinfektionstücher



Zur schnellen Desinfektion
Duftnote Flower
Gebrauchsfertig



58090 // PROTECTASEPT

Typ: Desinfektionstücher, gebrauchsfertig

Inhalt: 90 Blatt

Verpackungseinheit: 2 Stück

NITRAS PROTECTASEPT SOFT, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen, Wipes SOFT, Polyester / Cellulose-Mischmaterial getränkt mit Wischdesinfektion, Duftnote Flower, IHO-gelistet, Tuchgröße ca. 30 x 28 cm, gefaltet auf Rollenhöhe ca. 16 cm, nicht wiederverschließbarer Polybeutel, Wirksamkeit nach EN 16615 getestet, Rolle à 90 Blatt, Vertrieb gemäß Biozidprodukteverordnung nur in Deutschland, Biozidprodukte vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Biozid-Nr.: N-75519 UFI:1AFC-JN7C-H10P-K0H8



Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Care Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Zur schnellen Desinfektion
- + Duftnote Flower
- + Gebrauchsfertig



Eigenschaften

Nach neuesten Methoden geprüft, breites Wirkungsspektrum bereits nach 1 Minute, reißfestes Vlies, angenehme, frische Geruchsvarianten, verdunstet schnell, Tuberkulozide Wirksamkeit bei hoher Eiweißbelastung, einfache Handhabung, Zulassung als Medizinprodukt und Biozid

Präparate-Typ

Alkoholische Feuchttücher zur Schnelldesinfektion auf Basis von Ethanol und quartäre Ammoniumsalze, mit angenehmem Geruch.

Anwendungsbereiche

Gemäß MPG: Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung: Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen.

Hinweise zur Anwendung

Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmemeimer stellen. Das Tuch in der Mitte der Vliesrolle anziehen und von unten durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (für Acrylglas nicht geeignet). Nach Entnahme eines Tuches ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen. Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage im dazugehörenden Entnahmemeimer verwendbar. Das Stick- & Liftetikett wird vom Beutel abgezogen, auf den Entnahmemeimer aufgeklebt und das Haltbarkeitsdatum etc. händisch eingetragen. Die Aufbereitung des Spendereimers ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungshinweise mit einem geeigneten Desinfektionstuch durchzuführen. Bei der Anwendung sind geeignete Handschuhe (z. B. aus Nitrilkautschuk) zu tragen.

Faserzusammensetzung

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 43,0g Ethanol, 8,0g 1-Propanol, 0,055g Didecyldimethylammoniumchlorid

Einwirkzeiten

Bezogen auf Tränkflüssigkeit:

Bakterien (EN 13727, EN 13697, hohe Belastung): Konz. 1min.

Candida albicans (EN 13624, EN 13697, hohe Belastung): Konz. 1min.

TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae, EN 14348, hohe Belastung): Konz. 1min.

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) gemäß DVV/2012 im Flächentest, hohe Belastung: Konz. 1min.

Begrenzt viruzid PLUS (hohe Belastung): Konz. 1min.

Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung): Konz. 1min.

Noro-Viren (EN 14476, hohe Belastung): Konz. 1min.

Rota-Viren (EN 14476 (hohe Belastung): Konz. 1min.

Bezogen auf die getränkten Tücher:

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615 und den Anforderungen der VAH, Stand: 02.04.2015 (hohe Belastung): Konz. 2min.

Sicherheitshinweise

H 228 Entzündbarer Feststoff. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

Vertrieb

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland

Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904119369	4059904125797	0,31 m	0,21 m	0,2 m	4,82 kg	60

Physikalische Eigenschaften

Dichte	0,912 g/ml
pH-Wert	<10,0

Zolltarifnummer: 38089410

Ursprungsland: Deutschland